

LCD R-net de Power Platform (CJSM2)

Manual de usuario | Español para EE. UU.

Introducción

Este manual de usuario cubre las funciones de su LCD R-net de Power Platform (CJSM2) panel de control y puede considerarse como una extensión del manual del usuario de su silla de ruedas eléctrica.

Lea y siga todas las instrucciones y advertencias que contienen los manuales que se proporcionan con su silla de ruedas eléctrica y sus accesorios. Su uso incorrecto puede causar lesiones al usuario y daños a la silla de ruedas. Para reducir estos riesgos, lea detenidamente toda la documentación suministrada, especialmente las instrucciones de seguridad y sus textos de advertencia.

También es muy importante que dedique el tiempo suficiente para familiarizarse con los diferentes botones, funciones y controles de dirección, así como las diferentes posibilidades de ajuste del asiento, etc., de su silla de ruedas y sus accesorios antes de comenzar a utilizarlos.

Toda la información, fotografías, ilustraciones y especificaciones se basan en la información del producto que se tenía en ese momento. Las fotografías e ilustraciones son ejemplos representativos y no pretenden ser reproducciones exactas de las piezas correspondientes.

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en el producto sin previo aviso.

Producido y publicado por Permobil

Edición: 3

Fecha: 2024-03-11

N.º pedido: 341131 spa-US

Cómo ponerse en contacto con Permobil

Permobil Inc.
300 Duke Drive
Lebanon, TN 37090
Estados Unidos



+1 800 736 0925



+1 800 231 3256



support@permobil.com



www.permobil.com

Oficinas centrales del grupo Permobil

Permobil AB
Per Uddéns väg 20
861 36 Timrå
Suecia



+46 60 59 59 00



info@permobil.com



www.permobil.com

1	Seguridad	5		
1.1	Tipos de señales de advertencia	5		
1.2	Señales de advertencia	5		
2	Panel de control R-net LCD de la Power Platform	7		
2.1	Toma del cargador	9		
2.2	Conectores hembra	9		
2.3	Botones e interruptores de palanca	10		
2.3.1	Interruptor de la palanca de alimentación, modo y perfil	10		
2.3.2	Palanca de velocidad máxima	11		
2.3.3	Botón de la bocina	11		
2.3.4	Botón de Modo	11		
2.3.5	Botón Perfil	11		
2.3.6	Botones de función	12		
2.4	Bloqueo y desbloqueo del sistema de control	16		
2.4.1	Bloqueo	16		
2.4.2	Desbloqueo	16		
2.5	Funciones del asiento	17		
2.5.1	Vuelva al modo de manejo	17		
2.5.2	Maniobras con el asiento	18		
2.5.3	Memoria	19		
2.6	Pantalla	21		
2.6.1	Símbolos en la pantalla	21		
2.6.2	Indicador de la batería	22		
2.6.3	Indicador de velocidad máxima	23		
2.6.4	Limitaciones de la velocidad o conducción máxima	24		
2.6.5	Modo de bloqueo	26		
2.6.6	Perfil actual	27		
2.6.7	Símbolo de carga	28		
2.6.8	Reinicio	28		
			2.6.9	Parada de emergencia
			2.6.10	Temperatura de la Power Platform
			2.6.11	Característica de seguridad
			2.6.12	En foco
			2.6.13	Mensajes
			2.6.14	Wifi
			2.6.15	Intensidad de la señal
			2.7	Menú Settings (Ajustes)
			2.7.1	Mensajes
			2.7.2	Distance (Distancia)
			2.7.3	Modo celular y modo avión
			2.7.4	Servicios de ubicación
			2.7.5	Bluetooth
			2.7.6	Configuración de infrarrojos
			2.7.7	Time
			2.7.8	Backlight
			2.7.9	Sistema
			2.7.10	Exit (salir)
			2.8	Modo Bluetooth
			2.8.1	Menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth)
			2.8.2	Configuración de la conexión
			2.8.3	Emparejamiento con un dispositivo
			2.8.4	Emparejamiento con diferentes dispositivos
			2.8.5	Desconexión de un dispositivo
			2.8.6	Selección de un dispositivo Bluetooth emparejado
			2.8.7	Ajustes avanzados
			2.8.8	Botones de operación en modo Bluetooth
			2.8.9	Notas para los ajustes modificados modificados después de la entrega
			2.9	Modo de infrarrojos
			2.9.1	General
			2.9.2	Configuración de infrarrojos
			2.9.3	Programación de un código infrarrojo

2.9.4	Programación de códigos infrarrojos secuenciados	58
2.9.5	Activación y desactivación de códigos infrarrojos	60
2.9.6	Eliminación de códigos infrarrojos	60

1 Seguridad

1.1 Tipos de señales de advertencia

En este manual se utilizan los siguientes tipos de señales de advertencia:



ADVERTENCIA!

Indica una situación peligrosa que si no se evita puede causar lesiones graves o la muerte, así como daños en el producto o daños materiales.



PRECAUCIÓN!

Indica una situación importante pero no peligrosa que si no se evita podría producir daños en el producto o daños materiales.



IMPORTANTE!

Indica información importante.

1.2 Señales de advertencia



ADVERTENCIA! Active el modo avión donde no se permita la transmisión de radio

La Power Platform de su silla de ruedas contiene un transmisor de radio. En algunas áreas no se permiten las transmisiones de radio y su silla de ruedas debe configurarse en modo avión. Ejemplos de estos tipos de áreas incluyen, entre otras:

- Lugares con atmósferas potencialmente explosivas como áreas de abastecimiento de combustible, debajo de cubiertas en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustibles o productos químicos, entornos con productos químicos o partículas en suspensión, como granos, polvo o polvos metálicos.
- Áreas donde se exige guardar silencio, como hospitales, clínicas o centros de atención médica, y para evitar posibles interferencias con equipos médicos delicados.
- Aeropuertos o el interior de aviones cuando el personal del aeropuerto o la aerolínea se lo indique.
- Áreas de explosiones o zonas en las que se solicite apagar “radios bidireccionales” o “dispositivos electrónicos” para evitar interferencias con las explosiones.

Es su responsabilidad mantenerse atento para saber dónde se permite la transmisión de radio y en dónde no.



ADVERTENCIA! Reemplace siempre las cubiertas del joystick dañadas

Proteja la silla de ruedas de la exposición a cualquier tipo de humedad como lluvia, nieve, barro o rocío.

Si alguna de las cubiertas o la funda del joystick tienen fisuras o roturas, debe reemplazarlas de inmediato. De lo contrario, podría entrar humedad en el sistema eléctrico y producir lesiones personales o daños materiales, o incluso provocar un incendio.



IMPORTANTE! Al soltar el joystick se detendrá el movimiento del asiento

Suelte el joystick en cualquier momento para detener el movimiento del asiento.



IMPORTANTE! Utilice únicamente el cargador de baterías que se proporciona

La garantía de la silla de ruedas se anulará si conecta otro dispositivo distinto al cargador de baterías que se proporciona con la silla, o si conecta la llave de bloqueo mediante la toma del cargador del panel de control.




IMPORTANTE! Los datos del sistema se pueden transmitir

La Power Platform en su silla de ruedas puede registrar la información del sistema y, si está activado, puede transmitir, en ciertos casos, algunos datos como la ubicación del GPS. Esta información ayuda, por ejemplo, al diagnóstico de los sistemas de la silla de ruedas y a mejorar de forma continua de la seguridad de la silla de ruedas. Permobil podría acceder a la información y compartirla con terceros:

- con el consentimiento del propietario de la silla de ruedas o de su representante personal,
- para realizar investigaciones relacionadas con la seguridad de la silla de ruedas o diagnósticos de su condición,
- como respuesta a una solicitud oficial de las fuerzas de la ley o de alguna otra agencia gubernamental,
- para su uso en la resolución de conflictos que involucren a Permobil, sus afiliados u organizaciones comerciales o de servicios, y
- según lo requiera o permita la ley.

Para obtener información adicional sobre la manera en que Permobil puede usar sus datos, consulte el aviso de privacidad en <https://privacy.permobil.com/>

2 Panel de control R-net LCD de la Power Platform

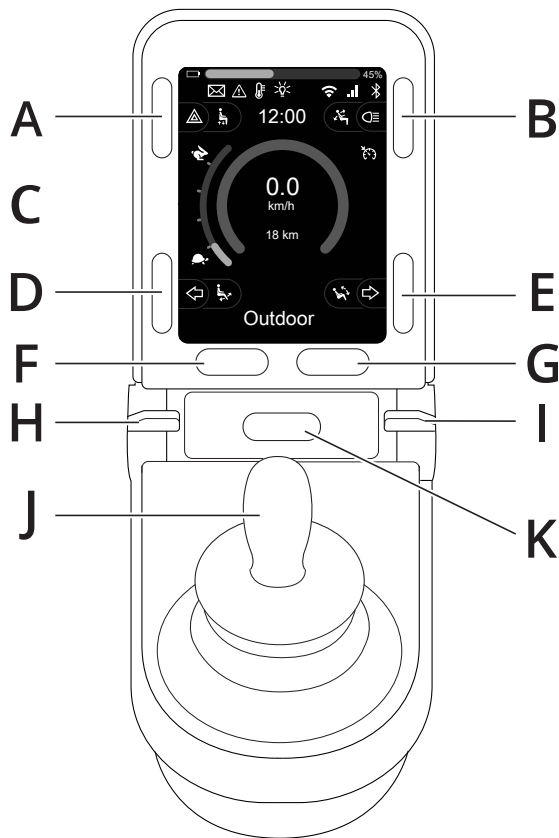

- A. Luces de emergencia y elevación del asiento
- B. Luces e inclinación del respaldo
- C. Pantalla
- D. Señal de giro a la izquierda e inclinación del reposapiernas
- E. Señal de giro a la derecha e inclinación del asiento
- F. Botón de Modo
- G. Botón Perfil
- H. Encendido o apagado de la alimentación principal, Selector de modo o perfil
- I. Palanca de velocidad máxima, aumentar o disminuir
- J. Joystick
- K. Botón de la bocina

La imagen del conjunto de la página anterior muestra las funciones básicas del panel de control. Los botones, los interruptores conmutadores y el joystick pueden tener otras funciones.

La toma del cargador se encuentra en la parte delantera del panel.

Hay dos conectores hembra situados en la base del panel. Uno se emplea para conectar un interruptor de encendido/ apagado externo, y el otro para un interruptor de perfil externo.


La silla de ruedas también puede equiparse con un panel de control adicional para el asiento (además del panel de control).

2.1 Toma del cargador

Esta toma solo puede utilizarse para cargar o bloquear la silla de ruedas. No conecte ningún cable de programación en esta toma. Esta toma no debe utilizarse como fuente de alimentación para ningún otro dispositivo eléctrico. Conectar otros dispositivos eléctricos podría dañar el sistema de control o afectar el cumplimiento de las normas de EMC (compatibilidad electromagnética) de la silla de ruedas.




IMPORTANTE! Utilice únicamente el cargador de baterías que se proporciona

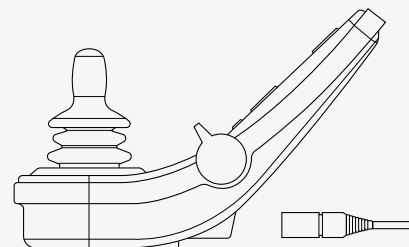

2.2 Conectores hembra

El conector externo de encendido/apagado **A** permite que el usuario encienda y apague el sistema de control mediante un dispositivo externo, por ejemplo, un pulsador.

El conector de perfil externo **B** permite que el usuario seleccione perfiles mediante un dispositivo externo, por ejemplo, un pulsador. Para cambiar el perfil mientras maneja, simplemente oprima el botón.

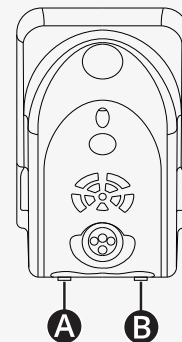

2.3 Botones e interruptores de palanca

El panel de control posee 7 botones y 2 interruptores de palanca.

2.3.1 Interruptor de la palanca de alimentación, modo y perfil

El interruptor de palanca se utiliza para encender o apagar el sistema de control.

Mueva el interruptor de palanca hacia adelante para encender la alimentación.



Mueva el interruptor de palanca hacia atrás para apagar la alimentación.

El interruptor de la palanca también se puede utilizar para desplazarse por los perfiles y modos disponibles. Empuje la palanca hacia adelante para desplazarse por los perfiles y modos disponibles.

Si el panel está equipado con una versión anterior del conmutador, como el que aparece en la figura, siga la descripción incluida a continuación.

Mueva el interruptor de palanca hacia atrás para encender o apagar la alimentación.


El interruptor de la palanca también se puede utilizar para desplazarse por los perfiles y modos disponibles. Empuje la palanca hacia adelante para desplazarse por los perfiles y modos disponibles.

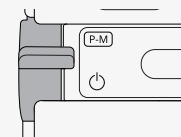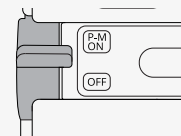

2.3.2 Palanca de velocidad máxima

Esta palanca aumenta o disminuye la velocidad máxima de la silla de ruedas. El indicador de velocidad máxima de la pantalla muestra el ajuste actual. Empuje la palanca hacia adelante para aumentar el ajuste y hacia atrás para disminuirlo.

Si su silla de ruedas tiene una Power Platform, entonces hay nuevos íconos en su panel de control. Consulte el capítulo 2.6 *Pantalla*, pág. 21.

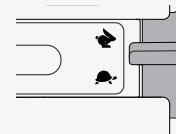

2.3.3 Botón de la bocina

La bocina sonará mientras mantenga oprimido este botón.




2.3.4 Botón de Modo

El botón de Modo permite que el usuario navegue por los modos operativos disponibles del sistema de control. La cantidad de modos disponibles varía.



2.3.5 Botón Perfil

El botón Perfil permite al usuario navegar por los perfiles disponibles en el sistema de control. La cantidad de perfiles disponibles varía.

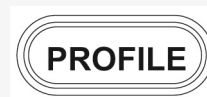

2.3.6 Botones de función

Hay cuatro botones de función ubicados en los lados izquierdo y derecho de la pantalla. Los símbolos de la pantalla muestran la función actual.

2.3.6.1 Luces de emergencia y elevación del asiento

Este botón controla las luces de peligro de la silla de ruedas si su silla de ruedas está equipada con luces, y la elevación del asiento si esta función está programada para su panel de control.


Las luces de peligro se utilizan cuando la silla de ruedas está estacionada en un lugar que representa un obstáculo para otras personas. Cuando las luces de peligro están encendidas, parpadea un símbolo en la pantalla que se sincroniza con las luces de peligro de la silla de ruedas.

Así se encienden y apagan las luces de peligro.

1. Oprima el botón para encender las luces de peligro.
2. Oprima de nuevo el botón para apagar las luces de peligro.

Así se controla la elevación del asiento.

1. Mantenga oprimido el botón para elevar el asiento hasta la posición deseada.
2. Mantenga oprimido de nuevo el botón para bajar el asiento hasta la posición deseada.

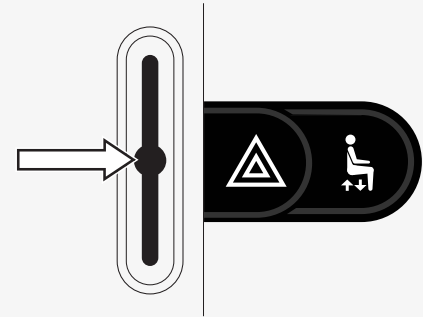

2.3.6.2 Luces e inclinación del respaldo

Este botón controla las luces delanteras y traseras, si su silla de ruedas está equipada con luces, y la inclinación del respaldo si esta función está programada para su panel de control.


Cuando las luces están encendidas, se ilumina un símbolo en la pantalla.

Así se encienden y apagan las luces.

1. Oprima el botón para encender las luces delanteras y traseras.
2. Oprima de nuevo el botón para apagar las luces delanteras y traseras.

Así se controla la inclinación del respaldo.

1. Mantenga oprimido el botón para inclinar el respaldo hacia adelante hasta la posición deseada.
2. Mantenga oprimido el botón de nuevo para inclinar el respaldo hacia atrás hasta la posición deseada.

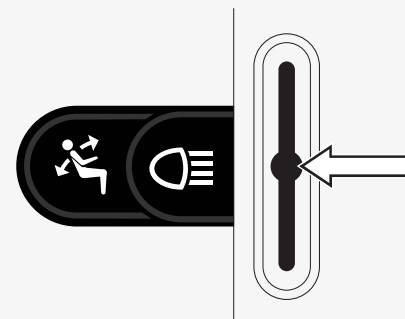

2.3.6.3 Señal de giro a la izquierda e inclinación del reposapiernas

Este botón controla la señal de giro a la izquierda si su silla de ruedas está equipada con luces, y la inclinación del reposapiernas si esta función está programada para su panel de control.


Cuando la señal de giro a la izquierda está encendida, parpadea un símbolo en la pantalla sincronizada con la señal de giro a la izquierda de la silla de ruedas.

Así se enciende y apaga la señal de giro a la izquierda.

1. Oprima el botón para activar la señal de giro a la izquierda.
2. Oprima el botón de nuevo para apagar la señal de giro a la izquierda.

Así se controla la inclinación del reposapiernas.

1. Mantenga oprimido el botón para inclinar el reposapiernas hacia adelante hasta la posición deseada.
2. Mantenga oprimido el botón de nuevo para mover el reposapiernas hacia atrás hasta la posición deseada.

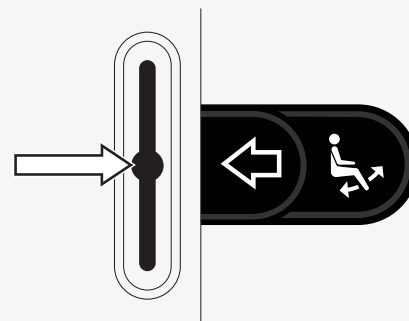

2.3.6.4 Señal de giro a la derecha e inclinación del asiento

Este botón controla la señal de giro a la derecha si su silla de ruedas está equipada con luces, y la inclinación del asiento si esta función está programada para su panel de control.


Cuando la señal de giro a la derecha está encendida, parpadea un símbolo en la pantalla sincronizada con la señal de giro a la derecha de la silla de ruedas.

Así se enciende y apaga la señal de giro a la derecha.

1. Oprima el botón para activar la señal de giro a la derecha.
2. Oprima el botón de nuevo para apagar la señal de giro a la derecha.

Así se controla la inclinación del asiento.

1. Mantenga oprimido el botón para inclinar el asiento hacia adelante hasta la posición deseada.
2. Mantenga oprimido el botón de nuevo para inclinar el asiento hacia atrás hasta la posición deseada.

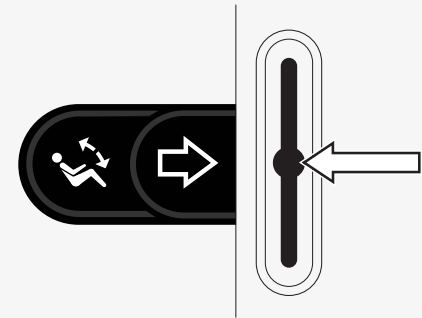

2.4 Bloqueo y desbloqueo del sistema de control

2.4.1 Bloqueo

- Encienda el sistema de control y mueva la palanca hacia atrás.
- Después de un segundo, el sistema de control emitirá un pitido. Ahora suelte la palanca.
- Mueva el joystick hacia adelante hasta que el sistema de control emita un pitido.
- Mueva el joystick hacia atrás hasta que el sistema de control emita un pitido.
- Suelte el joystick. Escuchará un pitido largo.
- Ahora la silla de ruedas estará bloqueada.
- La silla de ruedas se apagará.

2.4.2 Desbloqueo

- Si el sistema de control está apagado, mueva la palanca hacia adelante.
- Mueva el joystick hacia adelante hasta que el sistema de control emita un pitido.
- Mueva el joystick hacia atrás hasta que el sistema de control emita un pitido.
- Suelte el joystick. escuchará un pitido largo.
- Ahora la silla de ruedas estará desbloqueada.



2.5 Funciones del asiento

No todas las funciones del asiento están disponibles en todos los modelos de asiento.

En algunos asientos, las funciones se pueden controlar mediante el joystick del panel de control. Algunos modelos pueden memorizar seis posiciones del asiento. El mecanismo de ajuste del asiento guarda cada posición del asiento que se haya memorizado. Esto facilita la recuperación de una posición del asiento que se haya guardado anteriormente.

2.5.1 Vuelva al modo de manejo

Oprima el botón Mode (Modo) una o más veces hasta que aparezca una imagen de pantalla estándar con un indicador de velocidad en la pantalla del panel de control.



2.5.2 Maniobras con el asiento

1. Oprima el botón Mode (Modo) una o más veces hasta que aparezca un ícono de función del asiento en la pantalla del panel de control.
2. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un ajuste del asiento. El ícono de ajuste del asiento que haya seleccionado aparecerá en la pantalla. Los íconos mostrados varían según el modelo de asiento y las funciones disponibles.
3. Mueva el joystick hacia adelante o hacia atrás para activar la función.

En el modo asiento, se muestran las flechas.

- Las flechas blancas indican las direcciones en las que puede ajustar una función.
- Las flechas grises indican que no es posible una dirección.
- Si después de alcanzar la posición final intenta manejar una función, la flecha parpadeará en gris.

Si el símbolo M aparece junto al ícono del asiento, significa que la función de memoria está seleccionada. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un ajuste del asiento.

Para obtener más información sobre las funciones de la memoria, consulte 2.5.3 *Memoria*, pág. 19.



2.5.3 Memoria

2.5.3.1 Guardar una posición de asiento en la memoria

Algunos sistemas de control del asiento pueden memorizar seis posiciones del asiento. El mecanismo de ajuste del asiento guarda cada posición del asiento que se haya memorizado. Esto facilita la recuperación de una posición del asiento que se haya guardado anteriormente.

Procedimiento para guardar una posición de asiento en la memoria:

1. Ajuste la función del asiento en la posición que desee.
2. Seleccione la función de memoria del asiento al oprimir el botón Mode (Modo) una o más veces hasta que aparezca un ícono de función del asiento en la pantalla del panel de control.
3. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una posición memorizada (M home, M1, M2, M3, M4, o M5). La pantalla del panel de control mostrará el símbolo de memoria M de la posición memorizada que haya seleccionado.
4. Mueva el joystick hacia atrás y manténgalo así durante tres segundos para activar la función de guardar. El símbolo de memoria M parpadea. Mueva el joystick hacia adelante y manténgalo así durante tres segundos para guardar la posición actual.
5. El símbolo de memoria M permanecerá en la pantalla durante dos segundos para confirmar que la posición se memorizó y, luego desaparecerá.



2.5.3.2 Recuperación de una posición del asiento desde la memoria


Así se recuperará una posición de asiento de la memoria:

1. Oprima el botón Mode (Modo) una o más veces hasta que aparezca un ícono de función del asiento en la pantalla del panel de control.
2. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una posición memorizada (M home, M1, M2, M3, M4, o M5). La pantalla del panel de control mostrará un ícono del asiento y el símbolo de memoria M de la posición memorizada que haya seleccionado.
3. Mueva el joystick hacia adelante. El asiento se ajustará en la posición que se haya guardado previamente. Por razones de seguridad, el joystick debe mantenerse hacia adelante hasta que el asiento esté completamente ajustado en la posición memorizada. Una vez que el asiento se ajuste a la posición memorizada, dejará de moverse.



¡IMPORTANTE! Al soltar el joystick se detendrá el movimiento del asiento

4. Si selecciona una posición del asiento memorizada en el modo de bloqueo, la silla de ruedas continuará moviéndose hasta alcanzar la posición memorizada. Consulte 2.6.5 *Modo de bloqueo*, pág. 26.

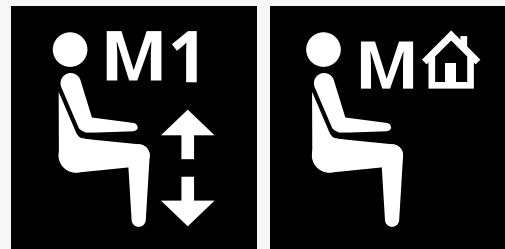


2.6 Pantalla

El estado del sistema de control se muestra en la pantalla. El sistema de control está activado cuando la pantalla está retroiluminada.

2.6.1 Símbolos en la pantalla

La pantalla de manejo R-net tiene componentes comunes que siempre aparecen y componentes que solo aparecen en determinadas condiciones.

- Ⓐ Nombre del perfil
- Ⓑ Señal de giro a la izquierda e inclinación del reposapiernas
- Ⓒ Indicador de velocidad máxima
- Ⓓ Luces de emergencia y elevación del asiento
- Ⓔ Indicador de la batería
- Ⓕ Reloj
- Ⓖ Luces e inclinación del respaldo
- Ⓗ Velocidad actual o limitaciones en el modo de asiento
- Ⓘ Señal de giro a la derecha e inclinación del asiento

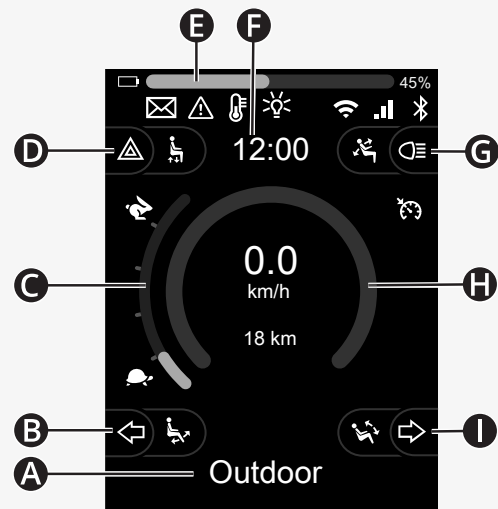

2.6.2 Indicador de la batería

El nivel de la batería se muestra de la siguiente manera:

Verde	45–100 %
Amarillo	25–44 %
Rojo	0–24 %

La barra de la batería parpadea cuando cambia de verde a amarillo y entre los niveles amarillos. Parpadea repetidamente en el nivel rojo.

El nivel de la batería también se muestra en porcentaje a la derecha de la barra de la batería. El porcentaje cambia en pasos de cinco.

Cuando los niveles se iluminan gradualmente, la silla de ruedas se está cargando. No podrá utilizar la silla de ruedas hasta que el cargador esté desconectado y el sistema de control se apague y se encienda de nuevo.



2.6.3 Indicador de velocidad máxima

La velocidad máxima actual se muestra en la escala entre los símbolos de la liebre y la tortuga.


Puede ajustar la velocidad máxima con la palanca de velocidad.



2.6.3.1 Símbolos de liebre y tortuga

El símbolo de la liebre indica una velocidad más alta.

El símbolo de la tortuga indica una velocidad más baja.

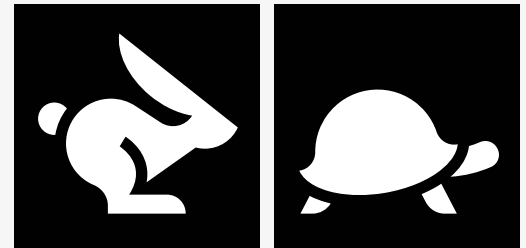

2.6.4 Limitaciones de la velocidad o conducción máxima


En el modo de conducción se muestran las limitaciones de la velocidad máxima, en combinación con la velocidad reducida en la barra de velocidad de la izquierda y un símbolo de tortuga naranja.

Aquí se muestra un ejemplo en el que la velocidad máxima está limitada a 3 km/h, lo que se indica mediante dos cosas:

- la barra reducida a la izquierda para el ajuste de la velocidad máxima, y
- la tortuga naranja que aparece en el centro de la pantalla.

Aquí se muestra un ejemplo de la velocidad máxima sin límite.

El número en la parte inferior de la pantalla muestra hasta dónde se ha conducido la silla de ruedas. En este ejemplo, esa distancia es de 33 km.

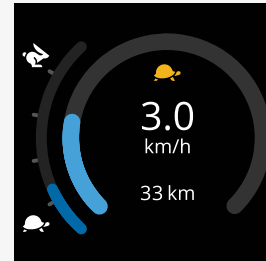

En el modo de asiento, el color del círculo indicará diferentes cosas:

- El color verde indica que la velocidad máxima no está limitada por la función del asiento activa mostrada.
- El color amarillo indica que la velocidad máxima está limitada por la función del asiento activa en la pantalla.
- El color rojo indica que la función del asiento activa en la pantalla impide la conducción.



2.6.5 Modo de bloqueo

El modo de bloqueo no está disponible en todos los modelos de silla de ruedas.

El modo de bloqueo se puede aplicar al modo de conducción o a las funciones del asiento.

Algunas sillas de ruedas tienen la función de bloqueo de conducción. Hay dos tipos de bloqueo de conducción.

1. El símbolo de bloqueo de la velocidad de crucero indica que puede aplicar ajustes continuos en la velocidad.


El símbolo es gris cuando el bloqueo de la velocidad de crucero está activado.

El símbolo es naranja cuando conduce con el bloqueo de la velocidad de crucero.

2. El símbolo de bloqueo escalonado indica que la velocidad se puede ajustar a intervalos establecidos.

El símbolo es gris cuando el bloqueo escalonado está activado.

El intervalo seleccionado se indica mediante el número de pasos naranjas en la pantalla.

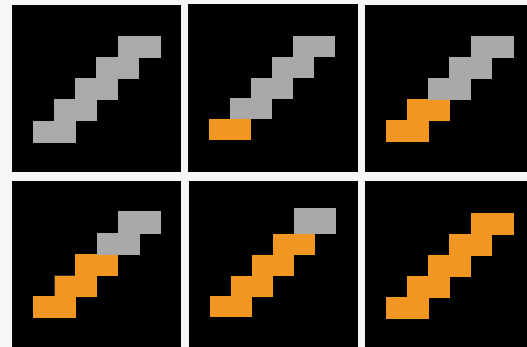

Algunas sillas de ruedas tienen funciones de bloqueo del asiento. El símbolo se vuelve naranja cuando la función del asiento está bloqueada.

2.6.6 Perfil actual

El número de perfil describe en qué perfil opera actualmente el sistema de control. El texto del perfil es el nombre o descripción del perfil en que opera actualmente el sistema de control.




2.6.7 Símbolo de carga

Se muestra un círculo girando cuando el sistema se está cargando.



2.6.8 Reinicio

Este símbolo parpadea cuando el sistema de control requiere un reinicio, por ejemplo, tras la reconfiguración de un módulo.

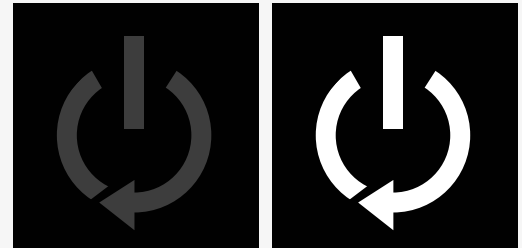

2.6.9 Parada de emergencia

Cuando el sistema de control está programado para bloquear el manejo o la operación del accionador, normalmente habrá un interruptor de parada de emergencia conectado en el conector del perfil externo. Este símbolo parpadea si el interruptor de parada de emergencia está accionado o desconectado.




2.6.10 Temperatura de la Power Platform

Este símbolo significa que se activó una característica de seguridad de Power Platform.

Esta característica de seguridad reduce la potencia de los motores y se restablece automáticamente cuando el sistema de control se ha enfriado.

Cuando aparezca este símbolo, maneje lentamente o detenga la silla de ruedas.

Si la temperatura de la Power Platform sigue aumentando, puede alcanzar un nivel en el que deba enfriarse, momento en el cual no será posible seguir conduciendo la silla de ruedas.

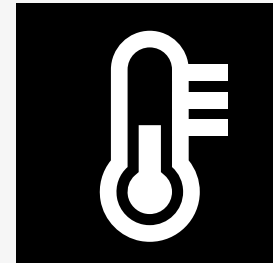

2.6.11 Característica de seguridad

Este símbolo significa que una característica de seguridad fue activada. Un ejemplo de función de seguridad es cuando la temperatura del motor es demasiado alta.


Esta característica de seguridad reduce la potencia de los motores y se restablece automáticamente después de cierto tiempo.

Cuando el sistema se restablece, el símbolo desaparece. Cuando aparezca este símbolo, maneje lentamente o detenga la silla de ruedas. Permobil recomienda que maneje despacio durante un breve periodo después de que haya desaparecido el símbolo, para evitar que la silla de ruedas sea sometida a un esfuerzo innecesario.

Si el símbolo aparece varias veces y la silla de ruedas no ha sido utilizada en ninguna de las condiciones mencionadas en el capítulo Restricciones de manejo, es posible que la silla de ruedas esté averiada. Póngase en contacto con el técnico de mantenimiento.

2.6.12 En foco

Cuando el sistema de control incluye más de un método de control directo como, por ejemplo, un módulo de joystick secundario o un módulo de asistente dual, el módulo que tiene el control de la silla de ruedas muestra el símbolo "En foco".

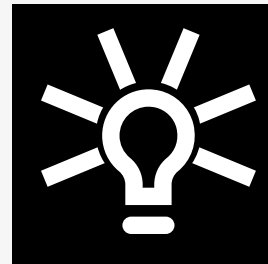


2.6.13 Mensajes

Este símbolo parpadea cuando el usuario recibe un mensaje.


2.6.14 Wifi

Este símbolo indica la presencia y la intensidad de una señal Wifi detectada.

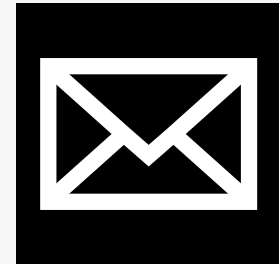

2.6.15 Intensidad de la señal

Este símbolo indica la presencia y la intensidad de una señal de red de radio detectada.

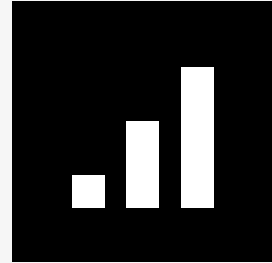

2.7 Menú Settings (Ajustes)

El menú Settings (Ajustes) permite que el usuario configure el reloj, el brillo de la pantalla, el color de fondo, entre otras opciones.

Mantenga oprimido el botón de función de las luces de peligro para abrir el menú Settings (Ajustes). Si los botones de función del panel de control están programados con las funciones del asiento, Oprima primero el botón de modo una o más veces hasta que aparezca el ícono de ajustes en la pantalla y, a continuación, mantenga oprimido el botón de función de luces de peligro para abrir el menú Settings (Ajustes).

Mueva el joystick para desplazarse por el menú. El movimiento del joystick hacia la derecha le permitirá entrar en un submenú con las opciones de la función relacionada.

Seleccione *Exit* (Salir) en la parte inferior del menú y mueva el joystick hacia la derecha para salir del menú Settings (Ajustes).

Cada uno de los elementos del menú se describe en las siguientes secciones.

2.7.1 Mensajes

No disponible en todos los paneles de control.

Un movimiento a la derecha del joystick lo dirigirá a un submenú para acceder a los mensajes.

2.7.2 Distance (Distancia)

La sección siguiente describe los submenús relacionados con la distancia (Distance).

Total Distance (distancia total)	este valor se guarda en el módulo de alimentación. Indica la distancia total recorrida desde que el módulo de alimentación fue instalado en el chasis.
Trip Distance (distancia recorrida)	este valor se guarda en el módulo del joystick, y muestra la distancia total recorrida desde el último restablecimiento.
Display Distance (visualización de la distancia)	establece si aparece Total Distance (Distancia total) o Trip Distance (Distancia recorrida) en la pantalla del contador de kilómetros en el módulo del joystick.
Clear Trip Distance (Borrar distancia recorrida)	un movimiento del joystick hacia la derecha borrará el valor de la distancia recorrida.

2.7.3 Modo celular y modo avión

Activa o desactiva la función celular. Cuando la función móvil esté apagada, la silla de ruedas estará en modo de vuelo.

En algunas áreas no se permiten las transmisiones de radio y la silla de ruedas debe configurarse en modo avión.



IMPORTANTE! Los datos del sistema se pueden transmitir



ADVERTENCIA! Active el modo avión donde no se permita la transmisión de radio

2.7.4 Servicios de ubicación

Activa o desactiva el servicio de ubicación.

2.7.5 Bluetooth

Un movimiento a la derecha del joystick iniciará un submenú para configurar la pantalla del modo Bluetooth.


Consulte el capítulo 2.8 *Modo Bluetooth*, pág. 40.

2.7.6 Configuración de infrarrojos

Válido para los paneles de control equipados con infrarrojos integrados.

Un movimiento hacia la derecha del joystick entrará en un submenú para programar y borrar códigos infrarrojos.

Consulte el capítulo 2.9 *Modo de infrarrojos*, pág. 54.

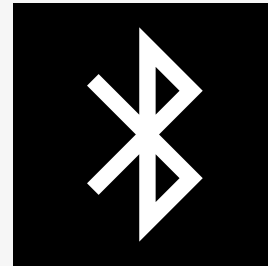

2.7.7 Time

La sección siguiente describe los submenús relacionados con la hora (Time).

- Set Time** permite al usuario establecer la hora actual.
- Display Time** establece el formato de la visualización de la hora o lo desactiva. Las opciones son 12 horas, 24 horas y Off (Apagado).

2.7.8 Backlight

La sección siguiente describe los submenús relacionados con la retroiluminación (Backlight).

- Backlight** esta opción ajusta la retroiluminación de la pantalla. Puede ajustarse entre 0% y 100%.
- Auto Backlight (retroiluminación automática)** El módulo del joystick contiene un sensor de luz ambiental que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla. Las opciones programables son Off o On (Encendido o Apagado). Si selecciona On, la pantalla ajustará el brillo de acuerdo con la lectura del sensor de luz. Si selecciona Off, el brillo de la pantalla no cambiará con los cambios de intensidad de la luz.
- Backlight Time (tiempo de retroiluminación)** define cuánto tiempo estará activada la retroiluminación desde la última instrucción que se recibió desde un dispositivo de entrada. Puede ajustarse entre 0 y 240 segundos.

2.7.9 Sistema

Diagnostics (diagnóstico) permite que el usuario lea la información de diagnóstico del sistema de control.

Timers (temporizador) permite que el usuario vea cuántas horas ha sido manejada la silla de ruedas.

2.7.10 Exit (salir)


Permite salir del menú Settings (Ajustes).

2.8 Modo Bluetooth

Su silla de ruedas está equipada con una Power Platform que tiene Bluetooth. Las funciones Bluetooth están preprogramadas en un ajuste básico en el perfil *Bluetooth devices* (Dispositivos Bluetooth). Esta configuración se describe a continuación.

La configuración básica está preparada para emparejar varios dispositivos Bluetooth. Puede realizar cambios en la configuración desde el menú *Bluetooth Settings* (Ajustes de Bluetooth). Por ejemplo, puede activar los comandos del ratón, ajustar el tiempo de impulso y ajustar la velocidad del puntero del ratón.

Para controlar un dispositivo Bluetooth desde el panel de control de su silla de ruedas, debe tener activado el modo Bluetooth y el dispositivo Bluetooth debe estar emparejado con la silla de ruedas. Consulte *2.8.1 Menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth)*.

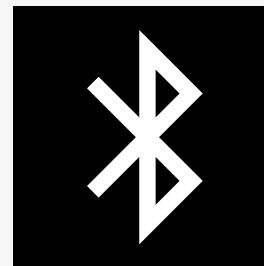

2.8.1 Menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth)

Mantenga oprimido el botón de función de las luces de peligro para abrir el menú principal Settings (Ajustes). Seleccione *Bluetooth* para abrir el menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth).



Si los botones de función del panel de control están programados con las funciones del asiento, oprima el botón de modo una o más veces hasta que aparezca el ícono de ajustes en la pantalla. Mantenga oprimido el botón de función al lado del ícono de ajustes para abrir el menú Settings (Ajustes). Seleccione *Bluetooth* para abrir el menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth).

En el menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth), puede activar o desactivar el modo Bluetooth y elegir la opción *Allow pairing* (Permitir emparejamiento).

Para emparejar un dispositivo Bluetooth con la silla de ruedas, siga las instrucciones para la configuración del emparejamiento con Bluetooth y el emparejamiento con un dispositivo. Consulte

2.8.2 *Configuración de la conexión y*

2.8.3 *Emparejamiento con un dispositivo.*

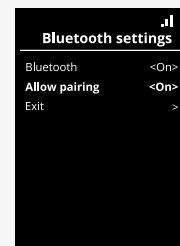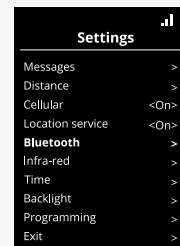


2.8.2 Configuración de la conexión

En esta sección se describe la configuración para emparejar un dispositivo Bluetooth con la silla de ruedas.

En el menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth):

- Encienda el *Bluetooth*.
Esto activa el modo Bluetooth en la silla de ruedas.
- Active la función *Allow pairing* (Permitir emparejamiento).
Esto permite que los dispositivos Bluetooth cercanos detecten la silla de ruedas.
- El ícono de Bluetooth comenzará a parpadear en la esquina superior derecha de la pantalla cuando otros dispositivos Bluetooth puedan detectar la silla de ruedas.
- Permanezca en este menú para emparejar un dispositivo Bluetooth con la silla de ruedas. Consulte 2.8.3 *Emparejamiento con un dispositivo*.

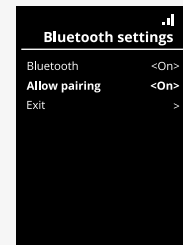

2.8.3 Emparejamiento con un dispositivo

Active el Bluetooth en el dispositivo que desea emparejar con su silla de ruedas.

En el menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth) del dispositivo:

- Encienda el *Bluetooth*.
- Seleccione *Add Bluetooth device* (Agregar dispositivo Bluetooth).
- Espere hasta que aparezca *Permobil* en la lista de dispositivos Bluetooth cercanos.
- A continuación, haga clic en *Permobil* para emparejar el dispositivo con la silla de ruedas.

En el menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth) del panel de control:

- El ID del dispositivo aparecerá en una nueva lista en esta pantalla en la sección *Mouse/Key devices* (Ratón/dispositivos clave) y el ícono de Bluetooth dejará de parpadear.
- Si el ID del dispositivo no aparece después de 30 segundos, salga del menú actual y vuelva a abrirlo.
- Una vez que un dispositivo se haya emparejado correctamente, la función *Allow pairing* (Permitir emparejamiento) se desactivará automáticamente.

El dispositivo seguirá emparejado con la silla de ruedas luego de que esta se apague y encienda. Cada vez que vuelva a conectar su silla de ruedas con el dispositivo, el ícono de Bluetooth parpadeará antes de que la luz quede fija. Es posible que el dispositivo esté listo para su uso antes de que el símbolo quede iluminado de forma fija.



2.8.4 Emparejamiento con diferentes dispositivos

La silla de ruedas puede emparejarse con varios dispositivos Bluetooth. Consulte 2.8.3 *Emparejamiento con un dispositivo*.

Hay un número máximo de dispositivos que se pueden emparejar con la silla de ruedas. Si ya alcanzó el límite, el siguiente dispositivo nuevo que empareje sustituirá al que se utilice menos.

2.8.5 Desconexión de un dispositivo

El proceso para desconectar un dispositivo Bluetooth de su silla de ruedas se inicia desde el dispositivo emparejado. Este proceso variará según el tipo de dispositivo. Consulte el manual de usuario de ese dispositivo para quitar a *Permobil* de su lista de dispositivos Bluetooth.

Para completar la desconexión:


- Abra el menú *Bluetooth Settings* (Ajustes de Bluetooth) en el panel de control de su silla de ruedas.
- Seleccione el dispositivo que desea desconectar de la lista en *Mouse/key devices* (Ratón/dispositivos clave).
- Abra *Advanced Settings* (Ajustes avanzados) y seleccione *Forget* (Olvidar).
- Confirme qué dispositivo desea desconectar de su silla de ruedas.

2.8.6 Selección de un dispositivo Bluetooth emparejado

Acceda al modo Bluetooth en el panel de control para acceder a uno de los dispositivos Bluetooth emparejados.



Oprima el botón **A** varias veces hasta que entre en el modo Bluetooth o mantenga oprimido el botón de función **B** para entrar al modo Bluetooth.

Si los botones de función de su panel de control están programados con las funciones del asiento, solo puede utilizar el botón **A** para acceder al modo Bluetooth.

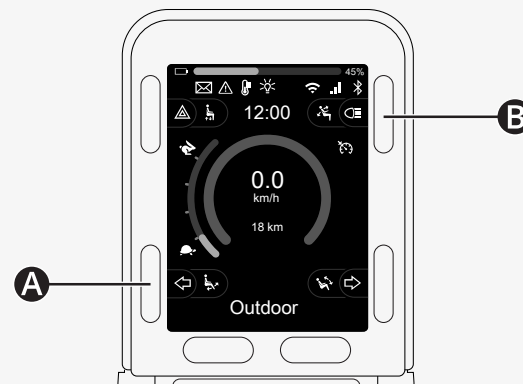

Si hay más de un dispositivo Bluetooth emparejado con Bluetooth activado, la pantalla muestra una lista de dispositivos emparejados. Para conectar y utilizar un dispositivo emparejado, seleccione el ID del dispositivo y mueva el joystick hacia la derecha.

Cuando haya seleccionado un dispositivo Bluetooth, la pantalla mostrará un ícono que representa el dispositivo elegido. Si solo hay un dispositivo Bluetooth habilitado, esta pantalla aparecerá en cuanto se active el modo Bluetooth.

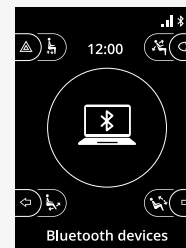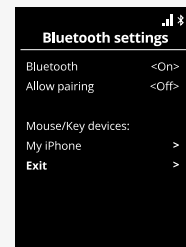

2.8.7 Ajustes avanzados

Puede ajustar cómo controla un dispositivo Bluetooth emparejado. Por ejemplo, puede ajustar la velocidad del puntero del ratón, asignar funciones clave y ajustar el tiempo de impulso. Un impulso es un movimiento rápido del joystick.



En el menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth), seleccione el ID del dispositivo Bluetooth emparejado e incline el joystick hacia la derecha.

Se muestran las siguientes opciones del menú:

- Velocidad del puntero
- Aceleración del puntero
- Impulso
- Teclas
- Ajustes avanzados

Las acciones de impulso del joystick se definen en tres grupos de ajustes: corto, medio y largo.

Seleccione un ajuste con movimiento a la derecha para ajustarlo.

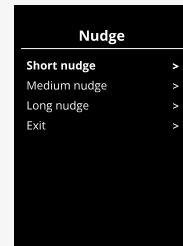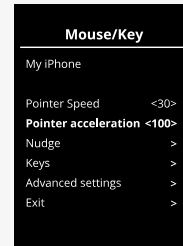


Nudge Time (Tiempo de impulso) especifica el tiempo necesario para registrar que se ha proporcionado un comando. La medición se indica en milisegundos.

Para desactivar las funciones de impulso, establezca el valor de *Nudge Time* (Tiempo de impulso) en 0.

Para desconectar un dispositivo Bluetooth de su silla de ruedas, vaya al menú *Advanced Settings* (Ajustes avanzados). Seleccione *Forget* (Olvidar) y, a continuación, confirme qué dispositivo desea desconectar de su silla de ruedas.

Seleccione *Action beeps* (Pitidos de acción) para activar o desactivar los sonidos de impulso.

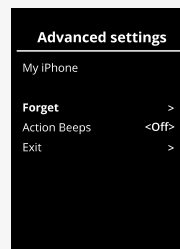


2.8.8 Botones de operación en modo Bluetooth

- A. Configuración del acceso, pág. 50.
- B. Volver al modo de manejo, pág. 50.
- C. Clic izquierdo del ratón, pág. 51.
- D. Clic derecho del ratón, pág. 51.
- E. Desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pág. 52.
- F. Funciones del joystick, pág. 52.

Los botones A a D, la palanca E y el joystick F tienen funciones predefinidas cuando se selecciona un dispositivo Bluetooth en el modo Bluetooth.

Su proveedor de servicios puede realizar cambios en las funciones predefinidas con la herramienta QuickConfig.


Las funciones predefinidas se describen a continuación.

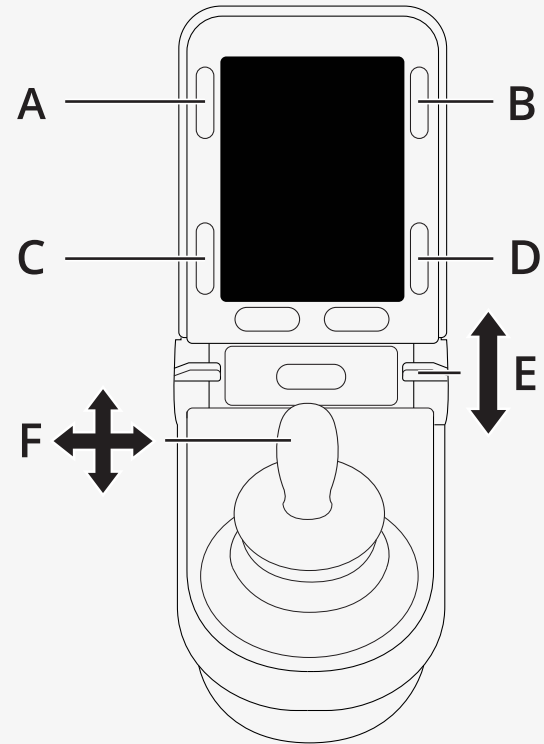

2.8.8.1 A: acceso a los ajustes

Mantenga oprimido el botón (A) para abrir el menú Settings (Ajustes). Para obtener más información sobre el menú de ajustes, consulte *2.7 Menú Settings (Ajustes)*, pág. 33.


Una pulsación corta activará o desactivará las luces de peligro.

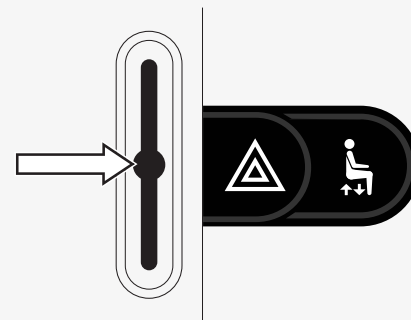

2.8.8.2 B: volver al modo de manejo


Mantenga oprimido el botón (B) para acceder al modo de manejo.

Una pulsación corta activará o desactivará las luces de peligro.

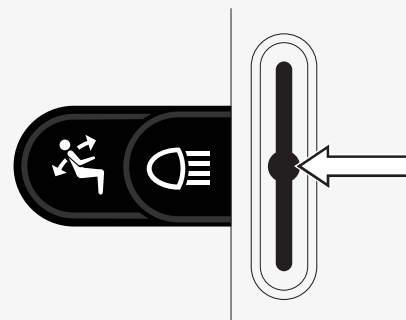


2.8.8.3 C: clic izquierdo del ratón

Oprima el botón (C) para hacer clic izquierdo con el ratón.

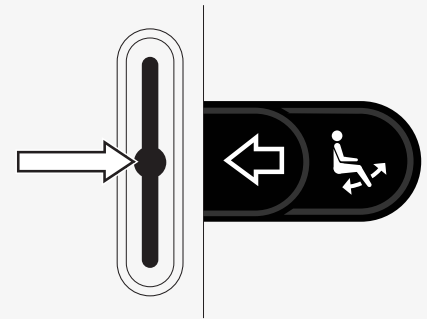

2.8.8.4 D: clic derecho del ratón


Oprima el botón (D) para hacer clic derecho con el ratón.

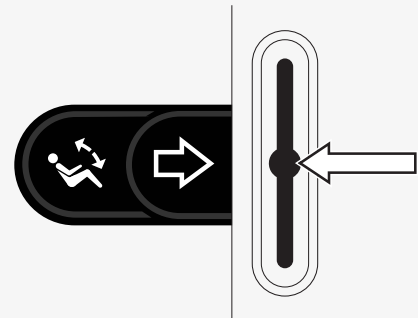

2.8.8.5 E: desplazarse hacia arriba o hacia abajo

Empuje el interruptor de la palanca para desplazarse hacia arriba.

Tire del interruptor de la palanca para desplazarse hacia abajo.

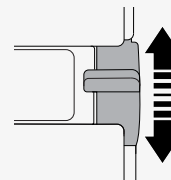

2.8.8.6 F: funciones del joystick


Mueva el joystick para desplazar el puntero en la dirección deseada.

Impulso hacia adelante para desplazarse hacia arriba.

Impulso hacia atrás para desplazarse hacia abajo.

Clic izquierdo del ratón: impulso hacia la izquierda.

Clic derecho del ratón: impulso hacia la derecha.

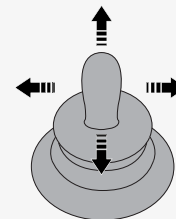

Un impulso es un movimiento rápido. Puede configurar los ajustes de impulso en el menú Bluetooth Settings (Ajustes de Bluetooth). Consulte

2.8.7 *Ajustes avanzados*, pág. 47.

2.8.9 Notas para los ajustes modificados modificados después de la entrega

Botón, interruptor conmutador o joystick	Función

2.9 Modo de infrarrojos

Solo se puede utilizar con paneles de control R-net con pantalla a color de 3.5 in (8.9 cm) o 2.8 in (7.1 cm) con infrarrojos integrados.

2.9.1 General

El control de infrarrojos integrado en el módulo del joystick permite replicar los dispositivos infrarrojos más utilizados, tales como los controles remotos para TV, audio, cable, satélite o controles ambientales.

Este manual describe el método de programación de códigos infrarrojos.

La silla de ruedas está preparada para el modo infrarrojo pero no hay códigos infrarrojos almacenados en el sistema cuando se entrega.



2.9.2 Configuración de infrarrojos



Puede acceder al menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos) mediante el menú Settings (Ajustes).

Consulte 2.7 Menú Settings (Ajustes), pág. 33.

Al entrar en el menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos), aparecerán los dispositivos predefinidos. Al seleccionar un dispositivo, la pantalla mostrará sus comandos.

Cuando un comando va seguido de una marca de verificación, esto indica que tiene un código infrarrojo guardado. Cuando un comando no tiene una marca de verificación, esto indica que su código infrarrojo aún no se ha guardado.


Los códigos infrarrojos pueden guardarse o eliminarse según se describe en las secciones siguientes.

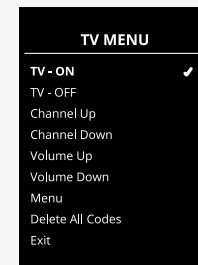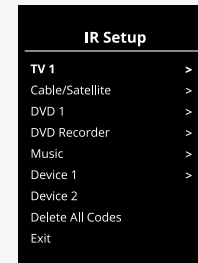

2.9.3 Programación de un código infrarrojo

El receptor de infrarrojos **A** está situado sobre la pantalla del panel de control.

Al programar un código, el dispositivo de control remoto deberá sostenerse de modo que su transmisor de infrarrojos apunte hacia el receptor de infrarrojos **A** del panel de control.

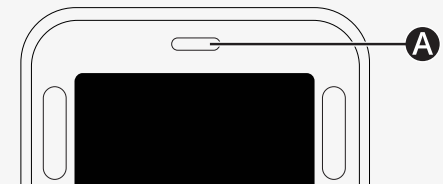

2.9.3.1 Procedimiento de programación de un código infrarrojo

Entre en el menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos).




Seleccione un dispositivo, por ejemplo, *TV* – (*Device 1*) (Dispositivo 1), como se muestra.

(*Device 1*) (Dispositivo 1) muestra dónde puede aparecer en la pantalla el nombre que identifica al equipo.

Los comandos para el dispositivo aparecerán en las pantallas tal y como se muestran en la figura. Seleccione un comando para programar.

En este ejemplo, se seleccionará *Channel Up* (Subir de canal) en el TV Menu (Menú de TV).

Mueva el joystick hacia la derecha para seleccionar el comando *Learn Code* (Programar código) cuando esté resaltado.

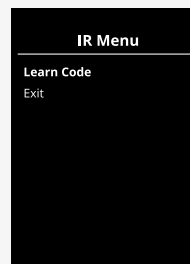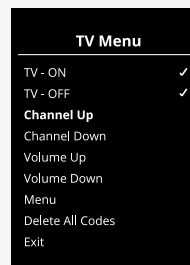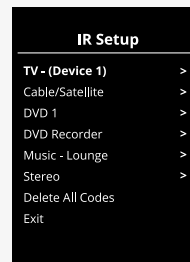



Apunte el control remoto de la TV hacia el receptor de infrarrojos del panel de control y oprima dos veces el botón para subir de canal.

Si la operación Learn Code (Programar código) se hizo correctamente, aparecerá en la pantalla una marca de verificación verde.

Si la operación Learn Code (Programar código) falla, aparecerá en la pantalla una marca de verificación roja. Vuelva a intentar la operación Learn Code (Programar código).

Una vez que haya programado el código, desplácese hacia abajo para resaltar *Exit* (Salir). Mueva el joystick hacia la izquierda para volver al menú del dispositivo Infrared Setup (Configuración de infrarrojos).

La primera vez que se programe un código infrarrojo, es necesario apagar la alimentación en el panel de control y volver a encenderla.

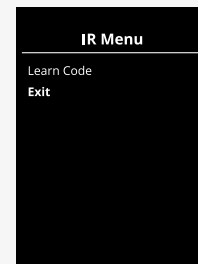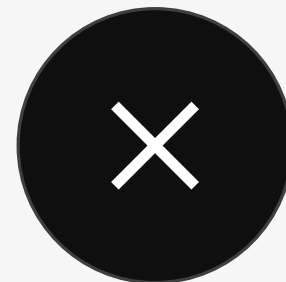

2.9.4 Programación de códigos infrarrojos secuenciados


Se pueden programar varios códigos infrarrojos con un solo comando en el menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos). Esto permite que varios códigos infrarrojos se transmitan a través de un solo comando cuando se esté en modo infrarrojo.

Ejemplos:

1. La función de encendido/apagado de varios dispositivos, por ejemplo, la TV y el DVD, puede programarse con una sola entrada en el menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos). Para ello, el panel de control enviará los códigos del comando programado en una sola transmisión. En este caso, el encendido y apagado del televisor y el reproductor DVD se realizará de manera simultánea.
2. La selección previa de un canal de TV exige que el usuario seleccione los dígitos del canal individual de una lista. Esto puede ser bastante incómodo cuando se intenta escoger un canal de TV con varios dígitos, por ejemplo, el canal 143. Ahora los códigos individuales para los números 1, 4 y 3 se pueden programar con un solo comando en el menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos). Cuando se selecciona este comando en el menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos), los códigos infrarrojos se transmiten prácticamente de forma simultánea.

2.9.4.1 Creación de una secuencia

- Seleccione el comando que desea utilizar como iniciador de secuencia. En este ejemplo, *TV – ON*.
- Seleccione *Learn Code* (Programar código) al mover el joystick hacia la derecha mientras el comando esté resaltado.
- Apunte el control remoto de la TV hacia el receptor de infrarrojos del panel de control y oprima el botón de encendido/apagado dos veces.
- Después de que se programe correctamente cada operación, aparecerá momentáneamente en la pantalla una marca de verificación; seleccione *Learn Code* (Programar código) de nuevo.
- Apunte el control remoto del DVD hacia el receptor de infrarrojos del panel de control y oprima el botón de encendido/apagado dos veces.
- Después de que se programe correctamente cada operación, aparecerá momentáneamente en la pantalla una marca de verificación; seleccione *Learn Code* (Programar código) de nuevo.
- Para completar la secuencia, resalte *Exit* (Salir) y mueva el joystick hacia la izquierda.
- Ahora, el comando *TV – ON* tendrá una marca de verificación y tres puntos junto a ella, mostrando la secuencia programada.

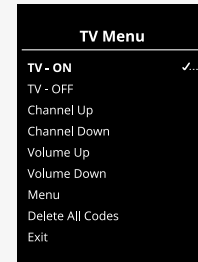

2.9.5 Activación y desactivación de códigos infrarrojos



Los códigos infrarrojos pueden activarse o desactivarse en el menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos). Si se desactiva un código, este no se transmitirá y no aparecerá en el modo infrarrojo.

Para desactivar un código infrarrojo, suba o baje la palanca de velocidad. Aparecerá un código infrarrojo desactivado con una X frente al comando resaltado.

Para activar un código infrarrojo, suba o baje las palancas de velocidad. Aparecerá un código activado con una marca de verificación al lado del comando resaltado.



2.9.6 Eliminación de códigos infrarrojos

Para eliminar un código infrarrojo de un comando específico, resalte el comando en el menú de dispositivos y mueva el joystick a la derecha. A continuación, seleccione la opción *Delete Code* (Eliminar código).

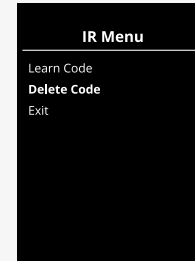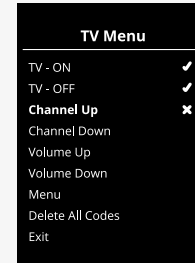

Para eliminar todos los códigos infrarrojos de un dispositivo, seleccione *Delete All Codes* (Eliminar todos los códigos) dentro del submenú de ese dispositivo.

Para eliminar todos los códigos infrarrojos almacenados en el panel de control, seleccione *Delete All Codes* (Eliminar todos los códigos) dentro del menú Infrared Setup (Configuración de infrarrojos).

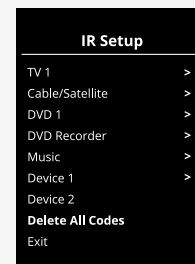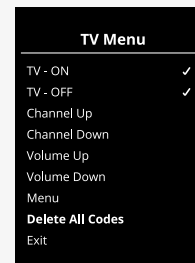

permobil

341131 spa-US



www.permobil.com