

Il manuale utente della consolle di comando contiene informazioni su come utilizzare la carrozzina. Le carrozzine elettriche modello 3 presentano grafiche aggiornate rispetto a quelle illustrate nel manuale utente. Fare riferimento alla tabella seguente per una traduzione visiva delle icone esemplificative.

Il manuale utente per la consolle di comando è disponibile qui:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Icone di base	Vecchia	Nuova	Icone esemplificative	Vecchia	Nuova
Lepre			Sollevatore del sedile		
Tartaruga			Ribaltamento del sedile		
Approfondimento			Schienale		
Temperatura			Poggiatesta		
Blocco crociera					

Di seguito sono riportate alcune delle nuove funzioni della consolle di comando.

1. Livello della batteria

- I livelli della batteria vengono visualizzati come segue:
 - verde 45-100%
 - giallo 25-44%
 - rosso 0-24%
- La barra della batteria lampeggia quando passa da verde a giallo e tra i livelli gialli. Lampeggia ripetutamente a livello rosso.
- Il livello della batteria viene visualizzato anche come numero percentuale a destra della barra della batteria. Varia in incrementi del cinque per cento.

2. Freccie

- Le frecce indicano le direzioni in cui è possibile regolare una funzione.
- Se una direzione non è possibile, la freccia è grigia.
- La freccia lampeggia tra bianco e grigio quando una funzione ha raggiunto la posizione di fine corsa.

Fare riferimento alla tabella seguente per un raffronto tra la schermata precedente e quella nuova della consolle di comando.

Panoramica della schermata	Vecchia	Nuova
<p> A Nome del profilo B Indicatore di direzione sinistra (e ribaltamento del poggiatesta) C Indicatore della velocità massima D Luci di emergenza (e sollevatore del sedile) E Indicatore della batteria F Orologio G Luci (e ribaltamento schienale) H Numero del profilo I Indicatore di direzione destra (e ribaltamento sedile) </p> <p> d Per la velocità attuale o le limitazioni in modalità sedile vedere di seguito. </p>		

3. Cerchio ^d

- In modalità di marcia, le limitazioni della velocità massima vengono visualizzate con una combinazione tra il cerchio e il simbolo della tartaruga arancione.

La velocità massima è impostata a 6 km/h e non sono applicate limitazioni.	
La velocità massima è limitata a 3 km/h e la limitazione è indicata da due elementi: <ul style="list-style-type: none"> la barra ridotta a sinistra per l'impostazione della velocità massima e la tartaruga arancione visualizzata al centro dello schermo. 	

- In modalità Sedile, il colore del cerchio indica diverse cose:

Il colore verde indica che la velocità massima non è limitata dalla funzione sedile attiva visualizzata.	
Il colore giallo indica che la velocità massima è limitata dalla funzione sedile attiva visualizzata.	
Il colore rosso indica che la guida è bloccata dalla funzione del sedile attiva visualizzata.	