

يحتوي دليل المستخدم الخاص بلوحة التحكم الخاصة بك على معلومات عن كيفية تشغيل الكرسي المتحرك. تحتوي الكراسي المتحركة الكهربائية من الطراز 3 على رسومات أحدث من الواردة في دليل المستخدم. يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على ترجمة مرئية لأمثلة الرموز.

يمكنك العثور على دليل المستخدم الخاص بلوحة التحكم الخاصة بك هنا:

[/https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels](https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels)



جديد	قديم	أمثلة على الرموز	جديد	قديم	الرموز الأساسية
		رفع المقعد			أرنب
		إمالة المقعد			السلفاة
		مسند الظهر			التركيز
		مسند الساق			درجة الحرارة
					مفتاح تثبيت السرعة

فيما يلي بعض الوظائف الجديدة في لوحة التحكم الخاصة بك.

1. مستوى البطارية
 - يتم عرض مستويات شحن البطارية على النحو التالي:
 - أخضر 100-45%
 - أصفر 44-25%
 - أحمر 24-0%
 - يومض شريط البطارية عندما يتغير من اللون الأخضر إلى الأصفر وبين مستويات اللون الأصفر. يومض بشكل متكرر على المستوى الأحمر.
 - يتم أيضاً عرض مستوى البطارية كنسبة مئوية على يمين شريط البطارية. ويتغير بمقدار خمسة بالمائة.
2. الأسهم
 - تشير الأسهم إلى الاتجاهات التي يمكنك من خلالها ضبط الوظيفة.
 - إذا لم يكن الاتجاه ممكناً، يكون السهم رمادي اللون.
 - يومض السهم بين اللونين الأبيض والرمادي عندما تصل الوظيفة إلى وضعيتها النهائية.

راجع الجدول أدناه للمقارنة بين الشاشة القديمة والجديدة بلوحة التحكم الخاصة بك.

جديد	قديم	نظرة عامة على الشاشة
		<p> A اسم ملف التعريف الشخصي B إشارة الانعطاف يساراً (وميل مسند السائق) C مؤشر السرعة القصوى D أضواء التحذير (ورفع المقعد) E مؤشر البطارية F الساعة G الأضواء (وميل مسند الظهر) H رقم ملف التعريف الشخصي I إشارة الانعطاف يميناً (وميل المقعد) d السرعة الحالية أو القيود في وضع المقعد، انظر أدناه. </p>

3. دائرة **d** في وضع القيادة يتم عرض أي قيود على السرعة القصوى كمجموعة من الدائرة والسحفاة ذات اللون البرتقالي.

	<p>يتم ضبط السرعة القصوى على 6 كم/ساعة ولا توجد قيود.</p>
	<p>يتم تحديد السرعة القصوى على 3 كم/ساعة، وهو ما يتم الإشارة إليه من خلال أمرين:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الشريط المخفض على اليسار لضبط السرعة القصوى، و - السحفاة البرتقالية التي تظهر في منتصف الشاشة.

في وضع المقعد، يشير لون الدائرة إلى أمور مختلفة:

	<p>يشير اللون الأخضر إلى عدم وضع حد للسرعة القصوى بوظيفة المقعد النشطة المعروضة.</p>
	<p>يشير اللون الأصفر إلى أن السرعة القصوى محددة بوظيفة المقعد النشطة المعروضة.</p>
	<p>يشير اللون الأحمر إلى أن القيادة محظورة وفقاً لوظيفة المقعد النشطة المعروضة.</p>